

洗浄針 (単回使用)

洗浄針 iNP40-S

Needle for irrigation with negative pressure


根管専門医が開発した iNP 法を実施できる針



特徴 1

針が細くても効果的な吸引量を実現!!

- ・針先端の寸法

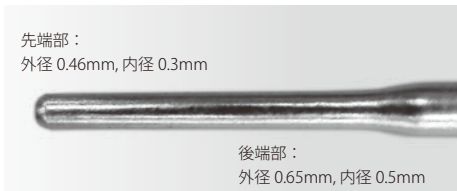

特徴 2

ソフトタイプの針は自由な形状に曲げることが可能です。




特徴 3

iNP法を効果的に実施できる洗浄針です。

iNP法とは

- ・根管の洗浄において歯冠側で洗浄液を吐出し根尖側で吸引します。
- ・洗浄液の漏れが少なくVapor Lockなど気泡の影響も少なくなる方法です。

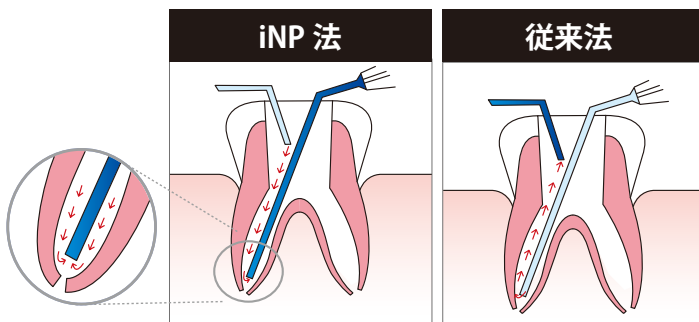

※根尖孔付近に洗浄針を挿入することで上部からの洗浄液が還流するので効果的な根管洗浄が実現できます。

	iNP 法	従来法
洗浄液漏出		
根尖孔		
スミア層		



■ 使用方法

① 針をシリンジ、その他の機器に接続する




シリンジ

その他の機器
バキュームアダプター




その他の機器
アスピレーター

② 針を根尖孔まで挿入する

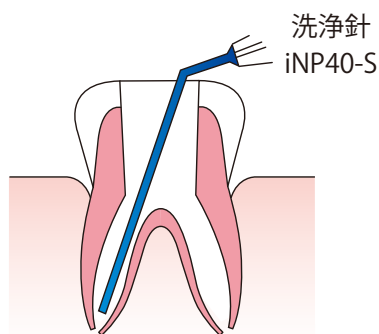

先端が細いソフトタイプの針なので根尖孔付近まで挿入が可能です

③ 洗浄剤を歯冠側から注入し吸引を行う

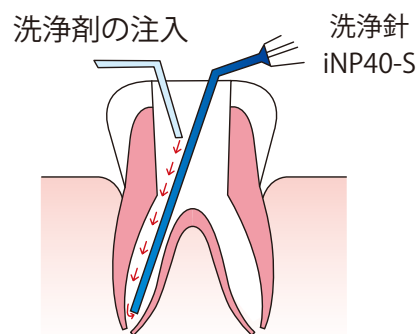

洗浄剤を充填したシリンジから洗浄剤を注入しながら吸引します

■ 製品情報

製品名	洗浄針 iNP40-S
一般的名称	洗浄針
JMDN	70459000
リスク分類	一般医療機器
届出番号	11B1X00018000006
入数	5本/Pack, 20Pack/箱
JAN	4900719503204, 4900719503201
その他	未滅菌



包装形態 (5本 Pack)



動画で詳細情報を確認

製造販売元

ドクター・ジャパン株式会社

行田工場 〒361-0023 埼玉県行田市長野4-15-1

本社 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1

TEL 03-3513-8766 FAX 03-3513-8226

www.drjapan-jp.com/j

販売店