

洗浄針 (単回使用)

洗浄針 iNP40-S


Needle for irrigation with negative pressure

専門医が開発した iNP 法を確実に実施できる針



特徴 1

テーパ形状の針は効果的な吸引量を実現

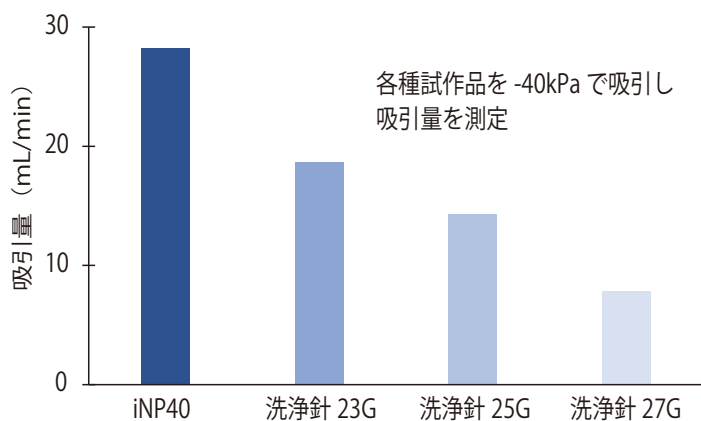

自社試作品での測定

特徴 2

針は手で自由に曲げることが可能




特徴 3

iNP法を確実に実施できる 洗浄針

iNP法

- 根管の洗浄において歯冠側で洗浄液を吐出し根尖側で吸引
- 洗浄液の漏れ、Vapor Lockなどの影響も少なくなる方法

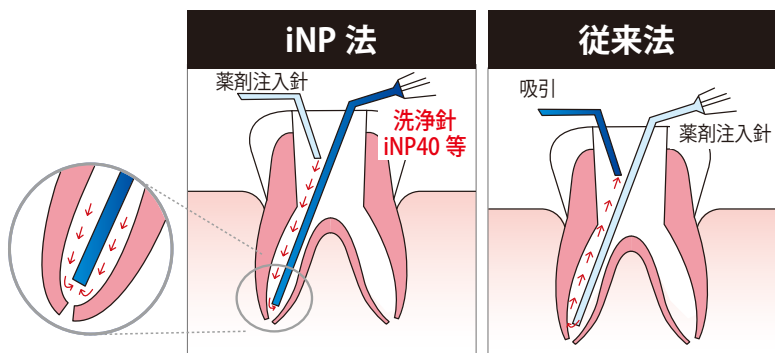


※ 根尖孔付近に針を挿入して上部からの洗浄液を吸引します。そのため洗浄液が根尖孔まで行き渡るので効果的に根管洗浄を実施できます。

	iNP 法	従来法
洗浄液 漏出		
根尖孔		
スメア層		

写真提供：吉岡デンタルオフィス

■ 洗浄針 iNP40-S の使用例

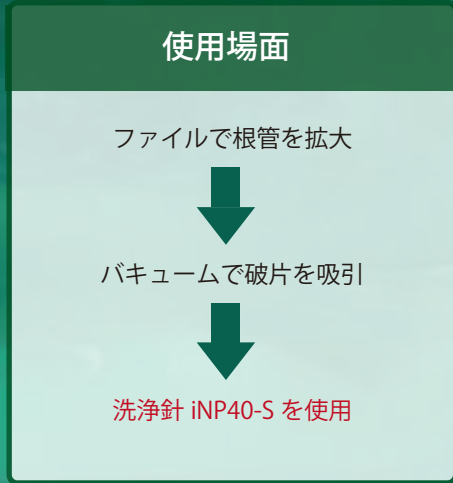


症例提供 吉岡デンタルオフィス

■ 使用方法

① 針をシリンジ、その他の機器に接続する




② 針を根尖孔まで挿入する

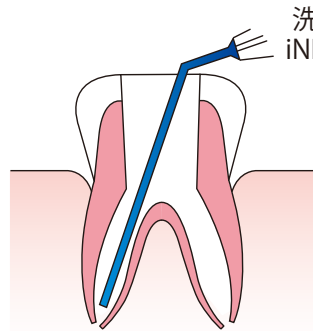

先端が細い針なので根尖孔付近まで挿入が可能です


③ 洗浄液を歯冠側から注入し吸引を行う

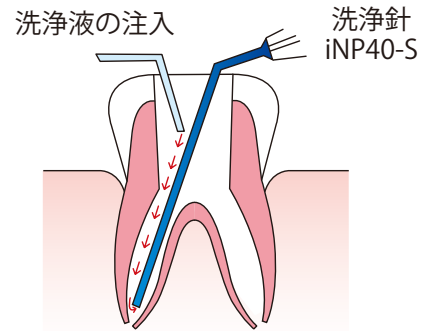

洗浄液を注入しながら吸引します

■ 製品情報

製品名	洗浄針 iNP40-S
一般的名称	洗浄針
JMDN	70459000
リスク分類	一般医療機器
届出番号	11B1X00018000006
入数	5本/Pack, 20Pack/箱
JAN	4900719503204
その他	未滅菌

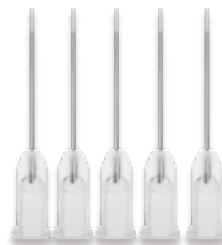

包装形態 (5本 Pack)

製造販売元

ドクタージャパン株式会社

行田工場 〒361-0023 埼玉県行田市長野4-15-1

本社 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1

TEL 03-3513-8766 FAX 03-3513-8226

販売店